

Näytteet-toiminto

Näytteiden konfigurointiin, kirjaamiseen ja seurantaan liittyvät toiminnot löytyvät OmaValvoja-palvelun "Näytteet"-valikosta.

Näytteet osana omavalvontasuunnitelmaa

Lämpötila- ja hygieniamittausnäytteiden ottaminen on osa ruokapalveluiden omavalvontaa. Näytteiden avulla varmistetaan ruokaturvallisuus. SmartKitchen-palvelu sisältää tällä hetkellä lämpötila- ja pintahygienianäytteiden digitaalisen tallentamisen ja hallinnoinnin.

Mittaustulosten kirjauksia tehdään kahdella tavalla:

1. Manuaalisesti nettiselaimella SmartKitchen-palveluun.
2. Käyttäen langattomia mittalaitteita ja Android-puhelimen KeittiöApuri-sovellusta.

Tässä ohjeessa kerrotaan:

- näyتهallinnan perustietojen konfigurointi nettipalveluun
- manuaalisesti tehdyt näytekirjaukset
- lämpötilanäytteen lukeminen langattomasti SmartKitchen I-käsimittarilta
- lämpötilanäytteen lukeminen langattomasti Raytemp-infrapunamittarilta
- pintahygienianäytteen lukeminen langattomasti Kikkoman Lumitester -luminometriltä

1. Esivalmistelut ja määrittely

Näytteet-toiminnon käyttö edellyttää, että käyttäjätillille on aktivoitu SmartKitchen OmaValvoja -lisenssi. Palvelun ylänavigointiin tulee näkyviin Näytteet-valikko.

Aloita määrittelemällä ensin näytteenottoaikat, ryhmät ja kohteet. Aktivoi lämpötilan mittalaitteet tilille.

Näytteenottoaikojen luonti

Valitse "Luo uusi näytteenottoaika".

Näytteenottoaika on kuvaus paikasta, josta näyte otetaan. Esimerkiksi "Keittiön pinnat", "Lounaspöydän lämpötilat", "Vastaanottolämpötilat", "Ravintolan pöydät", jne.

Ryhmien luonti

Valitse Näytteenottoaika → Asetukset-ikoni → Muokkaa ryhmiä ja kohteita

Ryhmät helpottavat kohteiden hallinnointia varsinkin silloin, kun niitä on paljon.

Esimerkiksi näytteenottoaikkaan "Lounaspöydän lämpötilat" voisi luoda ryhmät "Lämpimät ruoat", "Kylmät ruoat" jne.

Kohteiden luonti

Valitse Näytteenottoaika → Asetukset-ikoni → Muokkaa ryhmiä ja kohteita.

Mittauskohde kuvaa tarkemmin, mistä näyte otetaan. Esimerkiksi lämpötilojen osalta "Keitto", "Salaatti" jne. ja pintahygienian osalta "Tiskipöytä", "Ovenkahva" jne.

Mittalaitteiden aktivointi

Käytettävät lämpötilan mittalaitteet tulee aktivoida tilille. Valitse palvelun Asetukset-valikko → Mittalaitteet → Lisää uusi laite.
Huom! Kikkoman Lumitesteriä ei aktivoida tilille.

2. Kirjausten tekeminen manuaalisesti

Näytteiden tulokset syötetään palveluun käsin, jos käytetään manuaalisia mittalaitteita tai esimerkiksi liuskamenetelmää pintahygienian testaukseen.

Tee manuaalinen kirjaus:

1. Valitse näytteenottopaikka.
2. Valitse "Lisää näytetulos manuaalisesti"
3. Tee lomakkeella olevat kirjaukset ja kommentoinnit sekä hyväksy/hylkää näyte

3. Kirjausten tekeminen langattomilla mittalaitteilla

KeittiöApuri-sovellus

KeittiöApuri on Android-sovellus, jonka avulla siirretään langattomien mittalaitteiden mittaustulos SmartKitchen-palveluun. Huom! Käytössä tulee olla KeittiöApuri-sovelluksen versio 1.3 tai uudempi.

KeittiöApurin avulla kirjataan seuraavat näytteet:

1. Lämpötilanäyte SmartKitchen-käsimitarilta
2. Lämpötilanäyte Raytemp-infrapunamittalaitteella
3. Pintahygienianäyte Kikkoman Lumitester -luminometriltä

3.1. Lämpötilanäytteen ottaminen SmartKitchen I-käsimitarilla

Lämpötilanäytteen ottamisen edellytykset:

- Mittalaite on aktivoitu käyttäjätalille nettipalvelussa
- Näytteenottopaikka, ryhmät ja kohteet on määritelty lämpötilarajoihin
- Puhelimeen on asennettu KeittiöApuri-sovellus

Mittauksen suorittaminen:

1. Kirjautu KeittiöApuri-sovellukseen
2. Valitse "Lämpötilanäyte"
3. Kytke mittalaite päälle virtakytkimestä
4. Valitse käyttämäsi mittalaite, mittauksen suorittaja, näytteenottopaikka, ryhmä ja kohde.
5. Aseta mittalaitteen piikki mitattavaan kohteeseen
6. Valitse "Tallenna"
7. Kommentoi toimenpidettä tarvittaessa

3.2. Lämpötilanäytteen ottaminen RayTemp -infrapunamittarilla

Lämpötilanäytteen ottamisen edellytykset:

- Mittalaite on aktivoitu käyttäjätalille nettipalvelussa
- Näytteenottopaikka, ryhmät ja kohteet on määritelty lämpötilarajoihin
- Puhelimeen on asennettu KeittiöApuri-sovellus

Mittauksen suorittaminen:

1. Kirjautu KeittiöApuri-sovellukseen
3. Valitse "Lämpötilänäyte"
4. Kytke mittalaite päälle virtakytkimestä
5. Valitse käyttämäsi mittalaite, mittauksen suorittaja, näytteenottoaika, ryhmä ja kohde. Valitse "Tallenna" KeittiöApuri-sovelluksessa
6. Osoita mitattavaa kohdetta laitteen päällä olevalla mittausikkunalla. Älä paina mittalaitteen "measure"-nappia. Odota, kunnes mittalaitteen lämpötila näkyy KeittiöApuri-sovelluksessa.
7. Valitse KeittiöApuri-sovelluksessa "Tallenna".
8. Kommentoi toimenpidettä tarvittaessa.

ESIMERKKI LÄMPÖTILANÄYTTEEN OTTAMISESTA

Ravintolassa on tarjolla kylmä salaattibuffet. Kylmien ruokien tarjollapidossa lämpötila saa kohota korkeintaan +12 °C:een. Omavalvontasuunnitelman mukaan lämpötilänäyte tulee ottaa joka päivä yhden kerran.

Ennen lämpötilänäytteen ottamista mitattavaa ruoka-ainesta tulee sekoittaa hieman, koska salaatin lämpötila on pinnalta korkeampi kuin pohjalla. Lämpötilänäyte otetaan infrapunamittarilla osoittamalla ruoka-ainetta ja valitsemalla oikea kohde KeittiöApuri-sovelluksen "Lämpötilänäyte" valinnasta. Mittauksen yhteydessä voidaan myös tallentaa selventävä kommentti. Lämpötilänäytteen mittaustulos tallentuu automaattisesti SmartKitchen-palveluun.

2.3. Pintahygienianäytteen ottaminen Kikkoman Luminometrillä

Luminometri-hygieniamittauksen suorittamisen edellytykset

- Hygieniamittauksen näytteenottoaika, ryhmät ja kohteet on määriteltävä nettipalvelussa.
- Puhelimeen on asennettu KeittiöApuri-sovellus.
- Muodosta Bluetooth-yhteys Kikkoman luminometrin ja Android-puhelimen välillä erillisen ohjeen mukaan. Paritus tehdään vain kerran, minkä jälkeen puhelin tunnistaa laitteen automaattisesti.

Mittauksen suorittaminen

1. Noudata Lumipac A3 Surface pakkauksen ohjetta pyyhkäisyäytteen ottamiseksi.
2. Kirjautu KeittiöApuri-sovellukseen.
3. Valitse "Hygieninäyte"
4. Kytke Kikkoman Lumitester -laitteeseen virta.
5. Aseta pyyhkäisyäyteputkilo luminometrin mittaussaukkoon.
6. Valitse tarvittaessa käyttämäsi mittalaite, jonka jälkeen mittaustulokset luetaan valitsemalla "Seuraava". Odota, kunnes mittaus on suoritettu.
7. Valitse mittauksen suorittaja, näytteenottoaika, ryhmä ja kohde. Valitse "Seuraava".
8. Mittaus tallentuu SmartKitchen-palveluun.

ESIMERKKI PINTAHYGIENIÄNÄYTTEEN OTTAMISESTA

Pintahygienianäytteiden ottamiseen voidaan käyttää ravintolassa vakiintunutta menetelmää, esimerkiksi Hygicult-liuskoja, Hygienia- tai Kikkoman-luminometriä. Säännöllisten näytteiden avulla varmistetaan, että omavalvontasuunnitelman mukaista puhdistusta noudatetaan. Tulosten kirjausten avulla nähdään hetkelliset poikkeamat, arkistoidaan ja voidaan seurata myös pitkän aikavälin trendiä.

Puhtausmittauksen tuloksen perusteella voidaan todeta tehtyjen puhdistustoimenpiteiden onnistuneisuus ja tarvittaessa parantaa puhdistusprosessia halutun tuloksen saavuttamiseksi. Puhtausmittauksen perusteella voidaan myös seurata esimerkiksi työtasojen kuluneisuuden vaikutusta puhdistuksen tulokseen ja tarvittaessa perustella niiden uusimista.

Mittauksen tulos on vertailukelpoinen vain, jos käytetään jatkuvasti samaa menetelmää/laitetta, sillä eri valmistajien laitteet mittaavat hieman eri tavalla puhtautta.

HUOM! Palveluun tehdyt muutokset (näytteenottoapaikat, ryhmät ja kohteet) tulevat käyttöön viiveellä. Nähdäksesi muuttuneet tiedot heti käynnistä sovellus uudelleen.

Tämän käyttöohjeen sisällön tarkoitus on palvelun käytön opastaminen. Valmistaja jatkaa palvelun ja tuotteiden kehittämistä, joten ohjeessa kuvattuihin toimintoihin saattaa tulla muutoksia ilman ennakoilmoitusta. SmartKitchen / Ceruus Oy ei esitä mitään väitteitä tai myönnä mitään takuita tähän käyttöohjeeseen liittyen. SmartKitchen / Ceruus Oy ei ole velvollinen korvaamaan mitään vahinkoja, tappioita, kuluja tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät, epäsuorat, satunnaiset, välilliset tai erityiset kulut, jotka aiheutuvat tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käytöstä tai jotka liittyvät tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käyttöön.